

Signum metal bond

Signum metal bond I+II to system wiążący metal i żywicę do licowania koron, mostów na podbudowach metalowych oraz podczas wykonywania protez szkieletowych.

Skład:

Barwniki nieorganiczne, SiO₂ (silanizowany), metakrylan metylu, aceton, komponenty na bazie dwufunkcyjnego metakrylanu

Wskazanie:

- Połączenie żywic na bazie metakrylanu / kompozytów do licowania powierzchni konstrukcji metalowych przy jednoczesnym użyciu makromechanicznych elementów retencyjnych
- Połączenie żywic na bazie metakrylanu / kompozytów do licowania konstrukcji metalowych
- Preparat wiążący do naprawy licówek kompozytowych (wewnątrzustnie lub zewnątrzustnie)
- Preparat wiążący do naprawy odbudów ceramicznych
- Preparat wiążący do wkładów koronowo - korzeniowych, mostów Maryland i cementu kompozytowego

Technika

Wypiaskować przeznaczoną do licowania powierzchnię używając Al₂O₃ ok. 110 μm pod ciśnieniem 3 bar (piasek jednorazowego użytku). Następnie wyczyścić czystym (niezawierającym oleju - zanieczyszczeń) sprężonym powietrzem lub czystą wodą bieżącą (nie używać strumienia pary) i dokładnie wysuszyć.

Odpowiednią ilość Signum metal bond I umieścić w zagłębieniu naczynia. Nanieść czystym delikatnym pędzelkiem na opracowaną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Jeżeli to konieczne nałożyć drugą warstwę.

Wstrząsnąć Signum metal bond II, aby uzyskać optymalne rozłożenie składników i barwników na powierzchni podczas nakładania preparatu. **Innym** pędzelkiem równomiernie nanieść 1–2 warstwy Signum metal bond II i polimeryzować przez 90 sekund używając lamp: Heraflash, HiLite power lub UniXS. W przypadku użycia wewnątrzustnego Signum metal bond II należy polimeryzować przez 40 sekund używając stomatologicznej lampy do polimeryzacji (np. Translux Power Blue).

W celu uzyskania optymalnego wiązania istotne jest naniesienie warstwy opakera bez zanieczyszczenia powierzchni przez dotyk oraz bez szczelin. Następnie należy nanieść kompozyt lub tworzywo akrylowe.

Wskazania i przeciwwskazania:

Produkt jest przeznaczony tylko do zastosowania przez lekarzy stomatologów lub techników dentystycznych do wyżej wymienionych zastosowań.

Butelki z Signum metal bond I i II należy zamykać natychmiast po użyciu.
Preparat Signum metal bond II nie powinien w całość pokrywać powierzchni.
Odpowiednie maskowanie uzyskuje się poprzez zastosowanie Signum opaque F.

Wskazówki dotyczące zagrożeń / bezpieczeństwa:

Produkt Signum metal bond I + II należy przechowywać w temperaturze pokojowej (maks. 25 °C).

Produkt jest łatwopalny. Należy go przechowywać z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Produkt może działać drażniąco na oczy, narządy oddechowe i skórę. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą należy je niezwłocznie spłukać wodą i zgłosić się do lekarza.

Unikać bezpośredniego kontaktu ze śluzówką podczas wykonywania napraw wewnątrzustnie. W razie potrzeby zastosować koferdam.

W przypadku kontaktu ze skórą należy ją niezwłocznie umyć wodą z mydłem.

Aceton i MMA zawarte w produkcie mogą powodować reakcję alergiczną u pacjentów z nadwrażliwością na te substancje.

Produkt lub jeden z jego składników w szczególnych przypadkach może wywołać reakcje nadwrażliwości.

W przypadku wątpliwości informacje o składnikach można uzyskać od producenta.

Trwałość:

Data przydatności produktu jest podana na etykiecie każdej butelki. Produktu nie należy używać po upływie daty przydatności.

Wskazówki dotyczące utylizacji:

Należy postępować zgodnie z kartą danych substancji niebezpiecznej lub przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji.

Dostarczane opakowania:

Signum metal bond Set I + II (zestaw), naczynie do dozowania

Signum metal bond I uzupełnienie

Signum metal bond II uzupełnienie



Nasze porady techniczne w zakresie zastosowania, czy to w mowie, piśmie czy w drodze prób oparte są na naszej najlepszej wiedzy i dobrej wierze, działają jednak jako niewiążące wskazówki bez żadnej gwarancji, także w odniesieniu do ochrony praw osób trzecich i nie zwalniają użytkownika od obowiązku własnej oceny czy dostarczane przez nas produkty nadają się do zamierzonych celów i procedur. Zastosowanie, użycie i opracowywanie produktów następuje poza naszymi możliwościami kontroli i leży dlatego wyłącznie w obszarze odpowiedzialności użytkownika. Gwarantujemy oczywiście wolną od jakichkolwiek zastrzeżeń jakość naszych produktów według naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dystrybucji.

Biuro:

ul. I Dywizji Pancерnej 45
43-300 Bielsko-Biała
+48 (33) 496 35 39
info-poland@heraeus.com

Country Manager:

Jarosław Bruszewski
+48 600 047 209
jaroslaw.bruszewski@heraeus.com