

CE 0197

Stan na czerwiec 2006 r.,
przygotowano w styczniu 2005 r.
66031047/11-spr./D.O.G.

Heraeus



Instrukcja użytkowania Palaseal®/Palaclean

Palaseal

Światłoutwardzalny lakier do uszczelniania protez zębowych oraz tymczasowych koron i mostów, zawierający żywicę PMMA.

Palaclean

Preparat do czyszczenia pędzelków

Zastosowanie

Palaseal

- Uszczelnianie powierzchni protez zębowych
- Uszczelnianie powierzchni protez po wykończeniu (szczególnie szyjek zębów akrylowych)
- Uszczelnianie powierzchni tymczasowych koron i mostów

Palaclean

Usuwanie materiałów zawierających PMMA pozwalające na wielokrotne wykorzystywanie pędzelków.

Materiał

Palaseal jest światłoutwardzalnym lakierem do protez zębowych, nadającym nowym lub naprawianym protezom zębowym trwałą, gładką powierzchnię. Przezroczysty lakier nie zmienia koloru protezy. Gładka powierzchnia, którą można uzyskać za pomocą Palaseal na częściach protezy zębowej, zapobiega podrażnieniom języka oraz błony śluzowej. Lakier zapobiega przebarwieniu protezy, ogranicza możliwość powstawania osadów z jedzenia oraz zachowanie higieny w trakcie całego okresu użytkowania protezy.

Cechy szczególne

- Duża twardość powierzchni oraz odporność na ścieranie
- Odporność na środki do czyszczenia protez zębowych
- Dobre przyleganie do materiału protezy
- Gładka powierzchnia

Nakładanie

Palaseal jest bardzo prosty w użyciu. Po opracowaniu protezy paskiem ściernym należy wstępnie wypolerować pumeksem. Nie należy stosować tłustych lub zawierających olej roztworów czyszczących. Następnie trzeba osuszyć powierzchnię powietrzem wolnym od oleju oraz nałożyć cienką, równą warstwę Palaseal, pamiętając o nakładaniu materiału wyłącznie w jednym kierunku. Nie należy używać pędzla po raz drugi. Konieczne jest unikanie pęcherzyków powietrza. Materiał polimeryzuje się po 20 sekundach przez 90 sekund w urządzeniu UniXS, DentacolorXS lub HiLite Power. Wykańczanie nie jest konieczne, ponieważ w wyniku polimeryzacji uzyskiwana jest gładka powierzchnia.

Palaclean jest przeznaczony do czyszczenia pędzelków. Należy zanurzyć pędzle na kilka minut w preparacie i spłukiwać je przez krótką chwilę czystą wodą, a następnie wysuszyć czystą ściereczką.

Uwaga!

Palaseal należy utwardzać wyłącznie w urządzeniach Heraflash, UniXS lub Dentacolor XS. Protezę należy ustawić w teflonowym pojemniku i pozwolić na naświetlenie całkowicie powleczonej powierzchni. Jeśli w materiale występują zacienione powierzchnie (fałd błony śluzowej, przestrzenie międzyczębowe), wymagana

jest druga polimeryzacja trwająca 90 sekund. Należy wtedy ustawić protezę w taki sposób, aby możliwe było naświetlenie wcześniej zacienionych obszarów.

Informacja o zagrożeniach

Palaseal

Produkt zawiera metakrylan metylu, który jest łatwo palny, powoduje podrażnienia układu oddechowego i skóry. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenia w kontakcie ze skórą. Pojemnik należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu, gdzie nie wolno palić. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie zanieczyszczenia oczu należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i udać się do lekarza. W przypadku zanieczyszczenia skóry należy natychmiast przemyć skórę dużą ilością wody. Konieczne jest noszenie odpowiednich rękawic oraz ochrony oczu i twarzy.

Palaclean

Produkt łatwo palny, powoduje podrażnienia oczu. Powtarzające się narażenie na produkt może powodować suchość i pękanie skóry. Opary mogą powodować senność i zawroty głowy.

Produkt należy przechowywać z dala od zasięgu dzieci, a także z dala od źródeł zapłonu, w miejscach, gdzie nie wolno palić. W przypadku zanieczyszczenia oczu należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i udać się do lekarza. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Informacje na temat przechowywania

Nie należy przechowywać produktów w temperaturze wyższej niż 25°C. Należy unikać narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pojemnik należy zawsze przechowywać zamknięty. Produktów nie można używać po upływie daty ważności. Należy przechowywać produkty z dala od zasięgu dzieci.

Opakowania

Lakier do protez zębowych Palaseal 2 x 15 ml netto
Preparat do czyszczenia szczotek Palaclean 45 ml netto
Akcesoria

Uzupełnienia

Lakier do protez zębowych Palaseal 2 x 15 ml netto
Preparat do czyszczenia szczotek Palaclean 45 ml netto
„®” oznacza zarejestrowany znak towarowy Heraeus Kulzer GmbH

Nasze porady techniczne w zakresie zastosowania, czy to w mowie, piśmie czy w drodze prób oparte są na naszej najlepszej wiedzy i dobrej wierze, działają jednak jako niewiążące wskazówki bez żadnej gwarancji, także w odniesieniu do ochrony praw osób trzecich i nie zwalniają użytkownika od obowiązku własnej oceny czy dostarczane przez nas produkty nadają się do zamierzonych celów i procedur. Zastosowanie, użycie i opracowywanie produktów następuje poza naszymi możliwościami kontroli i leży dlatego wyłącznie w obszarze odpowiedzialności użytkownika. Gwarantujemy oczywiście wolną od jakichkolwiek zastrzeżeń jakość naszych produktów według naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dystrybucji.

Biuro:

ul. I Dywizji Pancерnej 45
43-300 Bielsko-Biała
+48 (33) 496 35 39
info-poland@heraeus.com

Country Manager:

Jarosław Bruszewski
+48 600 047 209
jaroslaw.bruszewski@heraeus.com