

Instrukcja obsługi PL

ALGINoplast®

Alginatowa masa normalnie i szybko (regular / fast) wiążąca

Zakres zastosowań: Alginoplast nadaje się do wszystkich odwzorowań, do których używane są alginaty.

Opis: regular set: żółty, niepyłący proszek na bazie alginatu

fast set: w kolorze lososiovym, niepyłący proszek na bazie alginatu.

Dozowanie: Łyżka do proszku i pojemnik na wodę.

Przygotowanie: Zawartość opakowania uzupełniającego po otwarciu natychmiast przesywać do szczelnej, zamykanej puszk. Za każdym razem otwierać i przesywać jedynie jedno opakowanie. Puskę przed użyciem za każdym razem 2-3 razy obrócić, aby spulchnić proszek.

Proporcje mieszanki: 23g proszku : 50 ml H₂O

Dozowanie:

Łyżka (-i) proszku	1	2	3	4
	7,0 g	14,1 g	21,2 g	28,2 g
woda	15,3 ml	30,6 ml	46,0 ml	61,2 ml

ALGINoplast® wyjąć łyżką z puszk i nadmiar zgarnąć, wsypać do miski do mieszania i dodać odpowiednią ilość wody.

Do odwzorowania pełnego uzębienia szczęki używa się przeciętnie 3 łyżki ALGINoplast® z odpowiednią ilością wody.

Zmieszać proszek i wodę za pomocą łopatki do homogennej konsystencji. Przy użyciu automatycznych urządzeń mieszających przestrzegać wskazówek producenta urządzenia.

	regular set	fast set
Czas mieszania:	30 sek.	30 sek.
Czas przetwarzania:*)	90 sek.	60 sek.
Minimalny czas działania w ustach:	90 sek.	60 sek.
Łączny czas:*)	180 sek.	120 sek.

Czasy oznaczone *) obowiązują od momentu rozpoczęcia mieszania i odnoszą się do temperatury 23°C/73°F dla proszku i wody z ok. 13 stopniami twardości. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury przedłużają te czasy. Zmieniające się stopnie twardości użytej do mieszanki wody prowadzić mogą również do odchyień w tych danych czasowych (przy użyciu wody destylowanej podwyższają się czasy przetwarzania o 30 sek.).

Odlewanie: Najwyższa dokładność modelu zostaje osiągnięta, gdy odcisk zaraz po wyjęciu zostanie gruntownie splukany i natychmiast np. przy użyciu MOLDANO® MOLDASTONE® lub MOLDASTYN® odlany. Jeśli konieczne jest dłuższe przechowywanie, przechowywać w wilgotnym środowisku (w zamkniętym pojemniku).

Dezynfekcja: Odwzorowania traktować można dostępnymi w handlu roztworami dezynfekcyjnymi. Prosimy przestrzegać przy tym przepisów dotyczących dezynfekcji/przetwarzania podawanych przez producenta.

Warunki przechowywania: ALGINoplast® zamknąć i wysuszyć przy max. 25°C/77°F.

Trwałość: Patrz nadruk na opakowaniu.

Nasze porady techniczne w zakresie stosowania w mowie, piśmie i poprzez próby oparte są na naszej wiedzy i dobrej wierze, działają jednak jako niewiążące wskazówki bez żadnej gwarancji, także w odniesieniu do ochrony praw osób trzecich i nie zwalniają użytkownika od obowiązku własnej oceny czy dostarczane przez nas produkty nadają się do zamierzonych celów i procedur. Zastosowanie, użycie i opracowywanie produktów następuje poza naszymi możliwościami kontroli i leży dlatego wyłącznie w obszarze odpowiedzialności użytkownika. Gwarantujemy oczywiście wolną od jakichkolwiek zastrzeżeń jakość naszych produktów według naszych Warunków Ogólnych Sprzedaży i Dystrybucji.

Producent:
Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
 Grüner Weg 11, D-63450 Hanau
www.heraeus-kulzer.com
info.dent@heraeus-kulzer.com

Kontakt w Polsce:
www.heraeus-dental.pl
 tel./fax:+48334963539
 e-mail:biuro@heraeus-kulzer.pl

Konsultanci medyczni:

lek. dent. Małgorzata Grzegorzak -Nowakowska tel.: 600 975 896 e-mail: m.grzegorzak@heraeus-kulzer.pl

tech. dent. Przemysław Rajczak tel.: 602 267 218 e-mail: p.rajczak@heraeus-kulzer.pl