

## Variotime Większe możliwości

Zdecyduj się  
na szybkość:  
dwa razy szybciej  
niż dotąd!

### Szybko i precyzyjnie przy użyciu Variotime i systemu szybkiego mieszania Dynamix!

Praktyczne pojemniki oraz nowy, funkcjonalny i szybki mieszalnik Dynamix Speed zostały idealnie dopasowane w tym dobrze przemyślanym systemie, który pozwala na skorzystanie ze wszystkich korzyści automatycznego mieszania materiałów wyciskowych.

- Szybkie mieszanie i precyzyjne dozowanie
- Jednorodnie zmieszane materiały wyciskowe bez pęcherzy powietrznych
- Trzy prędkości do wyboru



Pojemniki oznaczone symbolem szybkiego miksera Dynamix



Podwójna szybkość



Standardowa szybkość

## Variotime

Prawidłowe wyciski za każdym razem

[www.heraeus-dental.pl](http://www.heraeus-dental.pl)

## Dzięki szybkiemu systemowi Variotime Dynamix Speed dentyści zyskują:

### Skuteczność i łatwość obsługi

Nowy mieszalnik pozwala na jeszcze większą oszczędność czasu ze względu na automatyczne mieszanie ze zdwojoną prędkością oraz łatwą i intuicyjną obsługę. Mocny silnik i nowoczesne właściwości użytkowe umożliwiają proste i niezawodne użytkowanie.

### Wysoko niezawodną jakość materiału

Automatyczne mieszanie gwarantuje uzyskanie - niezależnie od operatora - jednorodnego materiału wyciskowego o powtarzalnej jakości bez pęcherzy powietrznych do wykonywania precyzyjnie dopasowanych uzupełnień.

### Większe bezpieczeństwo procesu

Tłoki nie przesuwają się przy otwartej pokrywie, dzięki czemu unika się ryzyka rozpryskiwania materiału oraz skałeczeń. Wskaźnik poziomu napełnienia informuje o konieczności zmiany pojemnika.

## Wybór prędkości dzięki szybkiemu mieszalnikowi Dynamix Speed:

### Wybór prędkości napełniania łyżki wyciskowej


- Po włożeniu pojemnika dostosowanego do szybkiego wyciskania (oznaczonego symbolem szybkiego mieszalnika Dynamix) należy nacisnąć odpowiedni przycisk prędkości, aby wyciskanie następowało ze zdwojoną prędkością.
- Po włożeniu pojemnika bez symbolu szybkiego mieszania nie trzeba wybierać prędkości. Automatycznie zostanie ustawiona prędkość standardowa (ST).
- Świecąca się dioda potwierdza wybraną prędkość.

### Produkt -----Nr katalogowy Materiały uzupełniające

- Variotime Dynamix **Putty Refill** ----- **6604 4995**  
3 x (2 x 380 ml) Dynamix Putty,  
3 x 2 końcówki mieszające Dynamix,  
3 x 1 pierścień mocujący Dynamix
- Variotime Dynamix **Heavy Tray Refill** ----- **6604 5000**  
3 x (2 x 380 ml) Dynamix Heavy Tray,  
3 x 2 końcówki mieszające Dynamix,  
3 x 1 pierścień mocujący Dynamix
- Variotime Dynamix **Monophase Refill** ----- **6604 5034**  
3 x (2 x 380 ml) Dynamix Heavy Tray,  
3 x 2 końcówki mieszające Dynamix,  
3 x 1 pierścień mocujący Dynamix



## Dwa razy szybciej nawet w przypadku mas Putty!

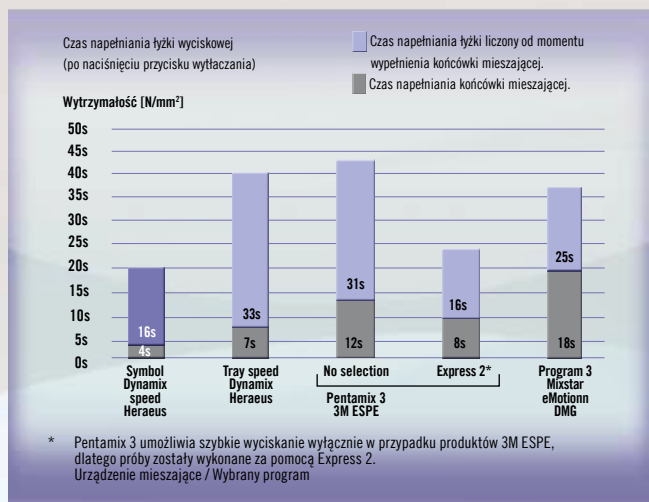

Czas napełniania łyżki wyciskowej Variotime Dynamix Putty, średnia wielkość łyżki (40 ml)  
Źródło: Dział Badawczo-Rozwojowy Heraeus, dane dostępne w aktach.

- Wybrana prędkość jest aktywna do momentu wymiany pojemnika lub przełączenia przez użytkownika na prędkość standardową.
- W celu rozpoczęcia mieszania należy zamknąć pokrywę i nacisnąć przycisk napełniania łyżki wyciskowej.

### Wybór prędkości napełniania strzykawki

- Po włożeniu pojemnika należy zamknąć pokrywę i nacisnąć przycisk napełniania strzykawki z odpowiednią prędkością, aby rozpocząć mieszanie.

### Produkt -----Nr katalogowy Materiały uzupełniające

- Variotime **Medium Flow Refill** ----- **6604 5036**  
6 x (2 x 50 ml) Medium Flow,  
6 x 10 żółte końcówki mieszające
- Variotime **Light Flow Refill** ----- **6604 5038**  
6 x (2 x 50 ml) Light Flow,  
6 x 10 żółte końcówki mieszające
- Variotime **Extra Light Flow Refill** ----- **6604 5040**  
6 x (2 x 50 ml) Extra Light Flow,  
6 x 10 żółte końcówki mieszające

Heraeus - Kulzer kontakt w Polsce: ☎/📠 (33) 496 35 39, ✉ info-poland@heraeus.com

Przedstawiciele regionalni Heraeus:

Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków, Kielce i okolice - Konrad Kędziora ☎+48 600 976 698, ✉ konrad.kedziora@heraeus.com

Radom, Lublin, Rzeszów i okolice - Grzegorz Welo, ☎+48 600 976 792, ✉ grzegorz.welo@heraeus.com

Poznań, Kalisz, Sieradz, Wrocław i okolice - Piotr Kupis, ☎+48 604 241 425, ✉ piotr.kupis@heraeus.com

Warszawa i okolice, Białystok - Monika Polak, ☎+48 508 249 599, ✉ monika.polak@heraeus.com

[www.heraeus-dental.pl](http://www.heraeus-dental.pl)