

Elastomerowa precyzyjna masa wyciskowa na bazie silikonu, sieciowana addycyjnie.

Asortyment Flexitime to idealnie dostosowany do siebie system, oferujący dzięki swojej różnorodności możliwość indywidualnego łączenia do wszystkich technik wycisku.

Materiał

Flexitime Easy Putty

Flexitime Dynamix Putty

Flexitime Heavy Tray

Flexitime Dynamix Heavy Tray

Flexitime Monophase

Flexitime Dynamix Monophase

Flexitime Medium Flow

Flexitime Correct Flow

Flexitime Light Flow

Opakowanie

puszka, 1:1, 2 x 300 ml

nabój, 5:1, 380 ml

nabój, 1:1, 50 ml

nabój, 5:1, 380 ml

nabój, 1:1, 50 ml

nabój, 5:1, 380 ml

nabój, 1:1, 50 ml

nabój, 1:1, 50 ml

nabój, 1:1, 50 ml

Działania niepożądane

Ten produkt lub jeden z jego składników może w szczególnych przypadkach powodować reakcje alergiczne. W razie wątpliwości, informacje o składnikach można otrzymać od producenta.

Wskazówki dotyczące stosowania

Nie jest zalecane zastosowanie w połączeniu z innymi materiałami silikonowymi.

Po użyciu dokładnie zamknąć puszkę. Nie zamieniać zamknięć / pokrywek / łyżek. Z naboju 50 ml wycisnąć trochę materiału przed założeniem końcówki mieszającej. Po użyciu pozostawić końcówkę mieszającą na naboju jako zamknięcie. Bezpośrednio przed następnym użyciem zdjąć końcówkę mieszającą i nałożyć nową końcówkę. Końcówki mieszające oraz końcówki wewnętrzne są produktami jednorazowymi. Aby zapobiec zakażeniu wzajemnemu pacjentów, końcówki wewnętrzne należy wyrzucać po każdym użyciu.

W przypadku wszystkich sieciowanych wiążących addycyjnie silikonowych mas wyciskowych przy styczności z produktami zawierającymi aktywną siarkę lub azot lub świeżo nałożonymi wypełnieniami lub odbudowami kompozytowymi może dojść do zmian w procesie wiązania. Do produktów tych należą m. in. rękawiczki lateksowe, masy wyciskowe na bazie wielosiarczaków lub roztwory retrakcyjne.

Masy wyciskowe Flexitime powinny mieć podczas obróbki temperaturę pokojową (23 °C/73 °F). Polisiloksany winylu są chemicznie odporne. Nieutwardzony materiał może zabrudzić ubranie. Przed pierwszym użyciem należy skontrolować, czy są widoczne uszkodzenia. Nie wolno stosować uszkodzonych produktów.

Flexitime	EN ISO 4823	Kolor produktu		Proporcja mieszania składników	Czas mieszania [s]	Czas trwania plastyczności* [min:s]	Czas pobierania wycisku [min:s]	Shore A twardość [–]	Odształcenie po ścisnieniu [%]	Odprężenie elastyczne [%]	Zmiana wymiarów liniowych (skurcz) [%]
		Baza	Katalizator								
Flexitime Easy Putty	Typ 0 do ugniatania	fioletowy	jasnoszary	1:1	30	2 :30	2 :30	70	2	99,7	0,2
Flexitime Dynamix Putty	Typ 0 do ugniatania	fioletowy	jasnoszary	5:1	auto	2 :30	2 :30	68	2	99,5	0,2
Flexitime Heavy Tray	Typ 1 o dużej gęstości	fioletowy	jasnoszary	1:1	auto	2 :30	2 :30	72	2	99,0	0,2
Flexitime Dynamix Heavy Tray	Typ 1 o dużej gęstości	fioletowy	jasnoszary	5:1	auto	2 :30	2 :30	72	2	99,0	0,2
Flexitime Monophase	Typ 2 o średniej gęstości	purpurowy	jasnoszary	1:1	auto	2 :30	2 :30	58	3	98,8	0,2
Flexitime Dynamix Monophase	Typ 2 o średniej gęstości	purpurowy	jasnoszary	5:1	auto	2 :30	2 :30	58	3	98,8	0,2
Flexitime Medium Flow	Typ 2 o średniej gęstości	jasnozielony	jasnoszary	1:1	auto	2 :30	2 :30	44	4	99,8	0,2
Flexitime Correct Flow	Typ 3 o niskiej gęstości	jasnozielony	jasnoszary	1:1	auto	2 :30	2 :30	38	5	99,7	0,2
Flexitime Light Flow	Typ 3 o niskiej gęstości	zielony	jasnoszary	1:1	auto	2 :30	2 :30	40	5	99,8	0,2

* przy temperaturze 23 °C/73 °F, 50 % wilgotności. Wyższa temperatura skarca, a niższa wydłuża czas wiązania.

Niniejsze dane zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w oparciu o wyniki wewnętrznych badań.

W przypadku dużych podcieni lub mocno rozbieżnych zębów w obszarze wycisku należy podczas stosowania Flexitime Heavy Tray lub Easy Putty uwzględnić zablokowanie tych powierzchni.

Wytwarzanie modelu:

Odlanie wycisku można wykonać już po 30 min. po wyjęciu z jamy ustnej, brak innych ograniczeń czasowych. Odcisk jest trwale stabilny na przechowywanie.

Zalecany materiał modelowy:

Możliwe zastosowanie wszystkich dostępnych w handlu materiałów modelowych.

Polecamy:

Gips klasy III, MOLDANO®

Gips klasy IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Galwanizacja:

Wyciski można miedziować i posrebrzać galwanicznie w zwykłych kąpielach.

Dezynfekcja:

Wyciski można dezynfekować wodnym roztworem podchlorynu sodu (5,25-procentowy, do 10 minut*) lub innym roztworem dezynfekcyjnym odpowiednim dla silikonu. Należy przy tym przestrzegać czasów dezynfekcji / przetwarzania podanych przez producenta.

*(DGZMK 3/93 V1.0)

Przyleganie do powierzchni tyżek wyciskowych:

Zalecamy stosowanie naszego kleju Universal Silicone Adhesive.

Warunki przechowywania:


Nie stosować mas wyciskowych Flexitime po upływie terminu ważności.

Nie przechowywać w temp. powyżej 25 °C/77 °F.


Dynamix System, 380 ml – krok po kroku




Rys. 1
Zdjąć zamknięcie
Włożyć nabój do
mieszalnika

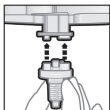


Rys. 2
Nałożyć końcówkę
mieszającą
Dynamix Mixing
Tip

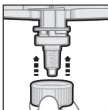


Rys. 3
Umieścić
pierścień
mocujący Dynamix

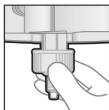

Rys. 4.1
Nałożyć pierścień
mocujący
Dynamix, wsunąć
przez zagłębienia

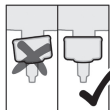

Rys. 4.2

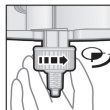

Rys. 5
Zablokować
obracając o 1/4
obrotu w prawo

Wkładanie naboju Dynamix

Informacje dotyczące obsługi używanego mieszalnika można znaleźć w szczegółowych instrukcjach sporządzonych przez danego wytwórcę.

1. Chwycić za języczek przy zamknięciu otworów wylotowych i wygiąć o 90° do góry, nie używając przy tym zbyt dużej siły.
2. Umieścić języczek między kciukiem a palcem wskazującym i jednocześnie trzymać mocno nabój drugą ręką i całkowicie zdjąć zamknięcie z naboju. (rys. 1)
3. Nałożyć jedną z dołączonych końcówek mieszających Dynamix Mixing Tips na otwory wylotowe naboju. (rys. 2)
4. Jeśli nie jest możliwe łatwe nałożenie końcówki mieszającej, należy sprawdzić, czy centralny wewnętrzny sześciokąt końcówki mieszającej jest prawidłowo ustawiony na sześciokąt wału napędowego.
5. Po prawidłowym umieszczeniu końcówki mieszającej (rys. 3) wsunąć pierścień ustalający Dynamix aż do zatrzaśnięcia przez końcówkę mieszającą i obrócić go w prawo (1/4 obrotu), do pewnego zablokowania. (rys. 4.1, 4.2, 5)
6. Wymieszaną masę wyciskową wtłoczyć do (oddzielnej) wewnętrznej strzykawki wyciskowej, np. Impression Jet (tylko Flexitime Dynamix Monophase) lub odpowiedniej łyżki wyciskowej.
7. Po użyciu masy konieczne jest odciągnięcie z powrotem tłoków mieszalnika z naboju, aby zapobiec utrzymywaniu się ciśnienia i tym samym dopływowi nadmiaru masy z końcówki mieszającej.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z Dynamix System

Naboje Dynamix są ciężkie i możliwe jest ich uszkodzenie w przy upadku.

Nie wolno używać uszkodzonych nabójów.

Naboje Dynamix stosować tylko w mieszalnikach z zamkniętą klapą ochronną.

Przed pierwszym użyciem konieczne jest wyrównanie poziomu napełnienia obydwóch komponentów materiałowych. Wycisnąć ok. 2–3 cm materiału i wyrzucić tę ilość przed rozpoczęciem napełniania łyżki. W przypadku używania naboju z różnymi mieszalnikami należy wyrzucić około 2–3 cm materiału po każdej zmianie przyrządu. Przed każdym zastosowaniem materiału sprawdzić kanały wylotowe naboju pod kątem zapchania.

Pod koniec dnia roboczego lub w przypadku nieużywania mieszalnika przez dłuższy czas, należy wyjąć nabój z urządzenia i przechowywać go w pozycji leżącej z zamkniętymi za pomocą końcówki mieszającej.

**Po użyciu pozostawić końcówkę mieszającą na naboju jako zamknięcie.
Bezpośrednio przed następnym użyciem zdjąć końcówkę mieszającą i nałożyć nową końcówkę.
W tym celu zdjąć pierścień ustalający Dynamix i zastosować ponownie przy nowo nałożonym mieszalniku.**

Stosować wyłącznie komponenty wchodzące w skład Dynamix System do dozowania i mieszania masy wyciskowej w nabojach Dynamix.

Regularnie sprawdzać komponenty systemu pod kątem uszkodzeń mechanicznych i używać wyłącznie części w dobrym stanie.

Opróżnione naboje można wyrzucać do pojemników zbiorczych na odpady systemu dualnego w Niemczech lub w powszechnie stosowanym systemie usuwania odpadów, spełniającym wymogi Dyrektywy UE 94/62/WE, jako odpad z tworzywa sztucznego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku styczności z oczami przemywać je wodą przez kilka minut. Jeśli dolegliwości nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem okulistą.

Nie wkładać do ust i nie połykać. Jeżeli po połyknięciu wystąpią dolegliwości zdrowotne, natychmiast skontaktować się z lekarzem. W rzadkich przypadkach może dojść np. do niedrożności jelit.

Do stosowania tylko przez lekarzy stomatologów.

**Biuro:**

ul. I Dywizji Pancерnej 45, pok. 201
43-300 Bielsko-Biała
+48 (33) 496 35 39
biuro@heraeus-kulzer.pl

Country Manager:

Jarosław Bruszewski
+48 600 047 209
j.bruszewski@heraeus-kulzer.pl

Konsultanci:

lek. dent. Małgorzata
Grzegorzak-Nowakowska
+48 600 975 896

tech. dent. Przemysław Rajczak
+48 602 267 218

Przedstawiciele:

Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków, Kielce i okolice
Konrad Kędziora +48 600 976 698

Warszawa, Lublin, Rzeszów i okolice
Grzegorz Welo +48 600 976 792

Poznań, Kalisz, Wrocław, Konin, Sieradz i okolice
Piotr Kupis +48 604 241 425

Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń
Grzegorz Rymarzak +48 502 261 007



66040257/01 - D.O.G./06.09