

## MEMOREG®2/MEMOSIL®2

### Instrukcja użycia PL

#### MEMOREG®2

Poliwinylosiloksan do bezpośredniej aplikacji, bardzo twardy.

Zastosowanie:

- Rejestracja zwarcia
- Materiał stabilizujący do wewnątrzustnych wkładów rejestrujących

#### MEMOSIL®2

Poliwinylosiloksan do bezpośredniej aplikacji, przezroczysty.

Zastosowanie:

- Rejestracja powierzchni żującej i powierzchni licowej
- Przenoszenie zamków ortodontycznych
- Osadzanie punktów odniesienia przed wykonaniem zdjęcia rtg, podczas planowania leczenia implantologicznego

	MEMOREG®2	MEMOSIL®2
Czas pracy	30 sek	45 sek
Czas w ustach	60 sek	3 min
Twardość A Shore	90	72
Kolor	różowy	przezroczysty

#### Środki ostrożności:

Przed umieszczeniem naboju w podajniku należy zdjąć zakrętkę przez jej przekręcenie i usunięcie.

Przed użyciem należy upewnić się, że otwory wyprowadzające są drożne.

Należy wycisnąć niewielką ilość materiału do momentu uzyskania równomiernego wypływu obu past. Następnie nałożyć odpowiednią końcówkę mieszającą i ustabilizować ją przez przekręcenie w prawo. Dozowanie i mieszanie będą przebiegać automatycznie.

Po użyciu należy ponownie założyć zakrętkę.

Silikonowe masy wyciskowe nie powinny mieć kontaktu z ubraniami i powierzchniami z powodu ich odporności chemicznej.

Reakcja wiązania może być zaburzona przez kontakt z płynami retrakcyjnymi zawierającymi chlorek żelaza lub siarczek glinu, jak i przez kontakt z metakrylatami, rękawiczkami lateksowymi lub związkami siarki. Dlatego należy unikać kontaktu z w/w i wskazane jest dokładne wypłukanie i wysuszenie miejsc aplikacji, celem uniknięcia zaburzenia procesu wiązania.

#### Wpływ temperatury:

Podane czasy dotyczą temperatury pokojowej 23°C i temperatury w ustach 36°C. Wyższa temperatura skraca, a niższa wydłuża podane czasy.

#### Przechowywanie: w temperaturze 18°C - 25°C.

Nasze porady techniczne w zakresie zastosowania, czy to w mowie, piśmie czy w drodze prób oparte są na naszej najlepszej wiedzy i dobrej wierze, działają jednak jako niewiążące wskazówki bez żadnej gwarancji, także w odniesieniu do ochrony praw osób trzecich i nie zwalniają użytkownika od obowiązku własnej oceny czy dostarczane przez nas produkty nadają się do zamierzonych celów i procedur. Zastosowanie, użycie i opracowywanie produktów następuje poza naszymi możliwościami kontroli i leży dlatego wyłącznie w obszarze odpowiedzialności użytkownika. Gwarantujemy oczywiście wolną od jakichkolwiek zastrzeżeń jakość naszych produktów według naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dystrybucji.

Jeżeli macie Państwo pytania proszę dzwonić : +49 6181 /35-5869

Heraeus Kulzer GmbH

[info.dent@heraeus.com](mailto:info.dent@heraeus.com)

Gruner Weg 11 - 63450 Hanau (Niemcy)

[www.heraeus-kulzer.de](http://www.heraeus-kulzer.de)

Importer: Marrodent Sp. z o.o. Konsultanci medyczni w Polsce:

43-384 Jaworze

lek. stom. Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska tel. +48 600 975896

ul. Morwowa 31tech.dent.

Przemysław Rajczak

tel. +48 602 267218

[www.marrodent.pl](http://www.marrodent.pl)