

# **ALLIGAT CHROMA fast set**

## **Instrukcja użytkowania**

**Szybkowiążąca, alginatowa masa wyciskowa.**

**Uzupełnienie: 453 g**

Po otwarciu opakowania przesyp zawartość do zamykanego, szczelnego pojemnika. Przed użyciem wstrząśnij dwa lub trzy razy zawartość pojemnika w celu spulchnienia proszku.

Proporcje mieszania: ½ miarki wody (w temp. ok. 20°C) na pełną miarkę proszku.

Przy użyciu szpatułki do mieszania mieszaj proszek z płynem przez ok. 30 sek.

Umieść masę na łyżce wyciskowej i w ciągu 60 sek. wprowadź do ust.

Wycisk pozostaw w ustach przez 60 sek.

Pojemnik z proszkiem przechowuj w chłodnym miejscu szczelnie zamknięty.

<b>Czas mieszania</b>	<b>30 sek. różowy</b>
<b>Czas pracy- czas na wprowadzenie wycisku do ust, od końca mieszania</b>	<b>60 sek. różowy</b>
<b>Minimalny czas wiązania w ustach</b>	<b>60 sek. różowy</b>
<b>Całkowity czas</b>	<b>150 sek. biały</b>