

GLUMA[®] Desensitizer Instrukcja użytkowania PL

Skład

- (2-Hydroksyetyl) metakrylan
- aldehyd glutarowy
- woda oczyszczona

Wskazania

GLUMA[®] Desensitizer stosuje się do leczenia nadwrażliwej zębiny. Działanie polega na redukcji przenikalności zębiny poprzez wytrącanie protein białka, a w konsekwencji zamknięciu obwodowych kanalików zębinowych. W ten sposób następuje zahamowanie przemieszczania się płynów kanalikowych, co jest powodem wrażliwości na ból.

GLUMA[®] Desensitizer znajduje zastosowanie:

- przy likwidacji bólu odsłoniętych, nie wymagających odbudowy szyjek zębowych,
- do zmniejszania lub unikania powstawania nadwrażliwości zębiny po preparacji zębów przygotowanych pod uzupełnienia stałe.

Dawkowanie i sposób stosowania

Leczenie nadwrażliwości zębiny.

Leczenie nadwrażliwości powierzchni zębiny jest wskazane tylko przy silnych bólach jako reakcja na czynniki termiczne, osmotyczne lub mechaniczne. Przy lekkich bólach zaleca się stosowanie alternatywnych środków (np. pasty do zębów znoszące nadwrażliwość).

- Wymagającą leczenia zębinę należy oczyścić (np. za pomocą pumeksu) w razie konieczności przy zastosowaniu środka znieczulającego, następnie wypłukać wodą.
- Błonę śluzową należy chronić używając koferdamu. Należy uważać, aby GLUMA[®] Desensitizer nie spływał z aplikowanego miejsca.
- Nanieść minimalnie potrzebną ilość preparatu GLUMA[®] Desensitizer na leczoną powierzchnię zębiny (np. przy pomocy pędzelka) i pozostawić na około 30-60 sekund.
- Leczoną powierzchnię ostrożnie osuszyć (przy użyciu dmuchawki) tak, aż warstwa cieczy zniknie i powierzchnia przestanie się błyszczyć, na koniec spłukać obficie wodą.
- Głęboko leżące ubytki oraz/lub miejsca znajdujące się w pobliżu miazgi należy przed zastosowaniem środka do znoszenia wrażliwości uszczelnić, pokrywając je preparatami chroniącymi miazgę oraz zębinę.

W przypadku, gdy po jednorazowym zastosowaniu GLUMA[®] Desensitizer ból nie ustąpi lub ustąpi w niewielkim stopniu można powtórnie zaaplikować preparat (podczas tej samej lub następnej wizyty) zanim zastosuje się alternatywną metodę leczenia.

Leczenie spreparowanej zębiny przed założeniem stałych uzupełnień:

- Chronić błonę śluzową używając koferdamu.
- Usunąć nadmiar wilgoci z preparowanej zębiny stosując łagodny strumień powietrza.

- Nanieść GLUMA® Desensitizer używając gąbki i pozostawić na 30-60 sek. Należy uważać, aby została użyta tylko minimalnie potrzebna ilość preparatu oraz aby GLUMA® Desensitizer nie spływał z aplikowanego miejsca.
- Następnie ostrożnie osuszyć powierzchnię leczonej zębiny strumieniem powietrza, spłukać obficie wodą i odsączyć.
- Głęboko leżące ubytki oraz/lub miejsca znajdujące się w pobliżu miazgi należy przed zastosowaniem środka do znoszenia nadwrażliwości uszczelnić, pokrywając je preparatami chroniącymi miazgę oraz zębinę.

GLUMA® Desensitizer może być stosowany wyłącznie przez lekarza stomatologa.

GLUMA® Desensitizer nie może być stosowany po upływie terminu ważności (patrz data na etykiecie). Nie przechowywać w temp. powyżej 25°C. Chronić przed dziećmi.

Ostrzeżenia

Szkodliwy dla zdrowia, zawiera aldehyd glutarowy, 2-Hydroxyethylmetakrylat

- Posiada potencjał miejscowo drażniący i działa toksycznie
- Istnieje ryzyko uczulenia
- Stosowanie GLUMA® Desinsitizer możliwe jest tylko przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności
- Pobierać tylko minimalne, niezbędne ilości z pojemnika i natychmiast potem szczelnie zamykać
- Szkodliwy dla zdrowia przy wdychaniu
- Podrażnia narządy oddechowe
- Podrażnia skórę
- Szkodliwy dla oczu
- Ryzyko wystąpienia uczulenia przy wdychaniu
- Ryzyko wystąpienia uczulenia przy kontakcie ze skórą
- W przypadku przedostania się do oczu natychmiast spłukać wodą i skontaktować się z lekarzem
- Używać odpowiednich rękawiczek
- Stosować okulary i ochronę twarzy
- Nie wdychać oparów i aerozolu
- Zapobiec kontaktowi ze skórą.

Przeciwwskazania

GLUMA® Desensitizer nie wolno stosować:

- Jeżeli zachowanie odpowiednich środków ostrożności lub zalecanej techniki stosowania jest nie możliwe,
- Przy alergii na składniki zawarte w GLUMA® Desensitizer,
- Przy bólach spowodowanych stanami zapalnymi miazgi,
- Na odkrytą miazgę lub zębinę w pobliżu miazgi

Działanie uboczne

Lokalnie występują podrażnienia miazgi w miejscach głębokich ubytków w przypadku nie zabezpieczenia miazgi lub zębiny. W powyższych przypadkach zaleca się przykrywanie obszarów w pobliżu miazgi odpowiednimi podkładami.

Nasze porady techniczne w zakresie zastosowania, czy to w mowie, piśmie czy w drodze prób oparte są na naszej najlepszej wiedzy i dobrej wierze, działają jednak jako niewiążące wskazówki bez żadnej gwarancji, także w odniesieniu do ochrony praw osób trzecich i nie zwalniają użytkownika od obowiązku własnej oceny czy dostarczane przez nas produkty nadają się do zamierzonych celów i procedur. Zastosowanie, użycie i opracowywanie produktów następuje poza naszymi możliwościami kontroli i leży dlatego wyłącznie w obszarze odpowiedzialności użytkownika. Gwarantujemy oczywiście wolną od jakichkolwiek zastrzeżeń jakość naszych produktów według naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dystrybucji.

Biuro:

ul. I Dywizji Pancерnej 45, pok. 118

43-300 Bielsko-Biała

+48 (33) 496 35 39

Info-poland@heraeus.com

Country Manager:

Jarosław Bruszewski

+48 600 047 209

jaroslaw.bruszewski@heraeus.com