

PreVision®CEM

Instrukcja użytkowania PL

Jednoskładnikowy cement do tymczasowego osadzania.

Opis produktu:

PreVision®CEM jest gotowym do użycia, aktywowanym wilgocią, niezawierającym eugenolu cementem na bazie żywic.

Odcień: biały.

Skład:

PreVision®CEM zawiera:

- Tlenek cynku
- Pirolityczną krzemionkę
- Wypełniacze

Wskazania:

PreVision®CEM służy do tymczasowego osadzania koron, mostów, stałych uzupełnień protetycznych.

Sposób użycia:

PreVision®CEM może być stosowany wyłącznie przez lekarza stomatologa.

- Materiał należy stosować w temperaturze pokojowej
- Spreparowany ząb należy oczyścić używając dmuchawki wodno-powietrznej
- Nadmiar wilgoci usunąć, nie osuszać zęba
- Cement zaaplikować na szklaną płytkę lub podkładkę do mieszania
- Przy użyciu szpatułki zaaplikować PreVision®CEM do korony
- Stosując lekki nacisk osadzić uzupełnienie protetyczne na zębie
- Pozostawić do związania na min 2 min, następnie usunąć nadmiary

Czas pracy:

- Czas plastyczności ok. 1min30sek w temp. pokojowej
 - Czas wiązania w ustach ok. 2min
- Czas wiązania wydłuża się dla grubszych warstw cementu, a skraca dla cieńszych warstw. Wiązanie poza jamą ustną może trwać dłużej z powodu niższego stopnia wilgotności i niższej temperatury w porównaniu do warunków panujących w jamie ustnej. Uzupełnienia tymczasowe nie powinny być poddane siłom nacisku przez min. 30min.

Retencja:

Retencja oprócz innych czynników zależy od grubości warstwy cementu.

- Cienka warstwa cementu zapewnia lepszą retencję niż warstwa grubsza

Uwagi:

Cement należy aplikować do suchych uzupełnień protetycznych. Filary powinny być wilgotne. Należy stosować jak najcieńszą warstwę cementu. Ponieważ materiał PreVision®CEM zaczyna twardnieć po wyciśnięciu z tubki, niewskazane jest równoczesne osadzanie więcej niż 3-4 punktów.

Nie stosować na obnażoną miazgę.

Jeżeli warstwa zębiny jest cienka lub u pacjenta istnieje ryzyko nadwrażliwości po zastosowaniu PreVision®CEM, wskazane jest uprzednio użycie preparatu GLUMA Desensitizer.

Tubkę należy szczelnie zamykać bezpośrednio po aplikacji. PreVision®CEM twardnieje w obecności wilgoci. Dlatego możliwe jest twardnienie materiału w pobliżu ujścia tubki. Pierwszą porcję po wyciśnięciu materiału z tubki należy usunąć.

Należy unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu spłukać obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

Sposób przechowywania:

Nie stosować po upływie daty ważności. Przechowywać w temperaturze 18-25°C, w suchym środowisku.

Postacie:

Pojedyncze opakowanie.