

Optosil® Xantopren®	EN 24823	Kolory	Baza g	Aktyw. Płynny ml	Aktyw. Pasta g	Czas miesz. sek	Czas Pracy Min	Czas wiąz. w ustach min	Czas Wiąż. min	Tward. A shore	Odszt. Po Ścisk. %	Odpęż. elast.%	Zmiana wym. Liniow. (skurcz) %
Optosil comfort	Typ 0	żółty	1 łyżka 10,6	6-8 kropli 0,15	6-8 jedn. 0,38	45	1,25	4,0	5,25	58	2,5	98	0,2
Optosil P plus	Typ 0	żółty	1 łyżka 14,4	4-6 kropli 0,11	4-6 jedn. 0,27	45	1,25	4,0	5,25	69	2,2	98,5	0,2
Xantopren H zielony	Typ 1	zielony	6 jedn. 11,0	12 kropli 0,26	12 jedn. 0,65	45	1,5	4,0	5,25	55	2,5	99	0,3
Xantopren M mucosa	Typ 2	Poma- rańczo- wy	12 jedn. 9,0	12 kropli 0,26	12 jedn. 0,65	30	1,5	4,0	5,0	43	6,8	99	0,6
Xantopren L niebieski	Typ 3	Niebies- ki	12 jedn. 8,0	12 kropli 0,26	12 jedn. 0,65	30	1,5	4,0	5,0	56	4,2	99	0,7
Xantopren VL Plus	Typ 3	Niebies- ki	12 jedn. 8,0	12 kropli 0,26	12 jedn. 0,65	30	1,5	4,0	5,0	53	5,0	99	0,7

- Przy temperaturze 23°C, (50+/-5% wilgotności.) Wyższa temperatura skraca, a niższa wydłuża podane czasy.
- Przedawkowanie o 30% skraca czas dla każdego produktu o 1 min.
- Jednostki miary jak podano na podkładce i na szpatułce (1jedn=1,3cm)
- Jednostki dotyczą dolnego pierścienia na miarce
- Dawkowanie: 1unit (3,9ml/4,4g)+8kropel(0,17ml/0,18g)

Typ 0= konsystencja kitu

Typ 1= wysoka lepkość

Typ 2= średnia lepkość

Typ 3= mała lepkość