

PreVISION CB

Instrukcja użytkownika PL

PreVISION CB jest materiałem do przygotowywania tymczasowych uzupełnień stałych: koron i mostów, techniką bezpośrednią. PreVISION CB jest materiałem dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym przygotowanym do automatycznego mieszania.

Opis produktu:

Dostępny w postaci kartridży do automatycznego podajnika 4:1, co gwarantuje jednorodną konsystencję i doskonałe parametry. Uzupełnienia tymczasowe z PreVISION CB są przygotowywane bezpośrednio w ustach na podstawie wycisku alginatowego lub silikonowego wykorzystując morfologiczny kształt zębów. Uzupełnienia te są bardzo estetyczne i zabezpieczają preparowane zęby jak i okluzję.

Skład:

PreVISION CB powstało na bazie wielofunkcyjnych metakrylatów z zawartością 44% wypełniacza w postaci szkła barowego.

Kolory:

A1; A2; A3,5

Przygotowanie podajnika:

Przed założeniem kartridża należy cofnąć uchwyt zabezpieczający 1.

Po założeniu kartridża 2 należy docisnąć uchwyt zabezpieczający, aż do zablokowania 3.

Aktywując pistolet wprowadzić tłoki do kartridża 4.

Odkręcić niebieską zakrętkę i ściągnąć ruchem w dół.

Przed nałożeniem końcówki mieszającej wycisnąć małą ilość materiału, aż do uzyskania swobodnego wypływu z obydwu otworów wyprowadzających.

Zamocować końcówkę mieszającą 5 i ufiksować ją przez obrót o $\frac{1}{4}$ 6 .

Po użyciu należy usunąć końcówkę mieszającą i nałożyć niebieską zakrętkę.

Istnieje możliwość pozostawienia końcówki mieszającej jako zakrętki, lecz należy zwrócić uwagę na jej dezynfekcję odpowiednimi roztworami.

Przed kolejnym użyciem należy zamocować nową końcówkę mieszającą sprawdzając uprzednio czy obydwa składniki wypływają równomiernie.

Nie należy używać końcówek mieszających przeznaczonych do mas wyciskowych.

Rysunek pistoletu.

Opis postępowania:

PreVISION CB jest materiałem przeznaczonym do użycia tylko przez lekarzy stomatologów.

1.Czas pracy (schemat)

Czas pracy			Faza plastyczna		Twardnienie	Ostateczne opracowanie
0s	45s	1min	2min	4min	6min	7min
	aplikacja do ust	koniec pracy	wiązanie	usunięcie z ust	usunięcie w. mazistej	ostateczne opracowywanie i polerowanie

2. Opis leczenia

Należy pobrać wycisk anatomiczny masą alginatową lub silikonową.

Wykonać preparację bądź usunąć stare uzupełnienia.

W wycisku należy usunąć przestrzenie międzyzębowe, aby osiągnąć dostateczną przestrzeń dla PreVISION CB, w przypadku braków zębowych wskazane jest wycięcie kanału w miejscu braku pomiędzy spreparowanymi zębami; taka procedura pozwoli stworzyć wzmocnienie w uzupełnieniu tymczasowym.

Wybrać odpowiedni kolor.

Aplikacja-

Splukać i osuszyć zęby.

Wypełnić wycisk materiałem PreVISION CB aplikowanym bezpośrednio z kartridża przez końcówkę mieszającą. Aplikację należy rozpocząć od powierzchni okluzyjnej w kierunku okolicy przydziąsłowej wypełniając do pełna, cały czas prowadząc końcówkę mieszającą zanurzoną w materiale. Do 45s wycisk ponownie umieścić w ustach lekko dociskając. W przypadku użycia przezroczystych formówek nadmiar należy usunąć bezpośrednio po aplikacji. Przechowywanie PreVISION CB w chłodnym miejscu przedłuża czas pracy o ok. 30s.

Usuwanie z ust-

Po upływie 2min30sek do 3min od aplikacji do ust (tzn. ok. 3min30sek do 4min od rozpoczęcia mieszania), należy usunąć uzupełnienie tymczasowe z powierzchni zębów. Bardzo ważne jest obserwowanie nadmiarów materiału w ustach, co daje kontrolę procesu wiązania. Koniecznym jest usunięcie uzupełnienia z ust pod koniec fazy plastycznej.

Ostateczne opracowywanie-

Po upływie kolejnych 2-3 min wiązania w wycisku (tj. ok. 6-7 min od rozpoczęcia mieszania) można rozpocząć ostateczne opracowywanie. Należy usunąć warstwę inhibicji tlenowej używając alkoholu, a następnie przystąpić do opracowywania używając frezów metalowych.

Osadzanie-

Należy używać cementu do tymczasowego osadzania np. PreVISION Cem zgodnie ze wskazówkami producenta.

3. Naprawa

Należy zmatowić uszkodzoną powierzchnię i wykonać zaczepy retencyjne.

Miejsce złamania skleić używając PreVISION CB tuż po zmieszaniu.

Uwagi:

Przed osadzeniem należy przemyć powierzchnię uzupełnienia alkoholem lub innym roztworem.

Ostrzeżenie:

Produkt drażniący w przypadku kontaktu z oczami lub skórą. W razie inhalacji może dojść do podrażnień. W przypadku kontaktu z oczami należy splukać je natychmiast obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. W razie kontaktu ze skórą należy przemyć podrażnioną powierzchnię i splukać wodą.

U osób wrażliwych na produkt należy szczególnie unikać kontaktu ze skórą

Przechowywanie:

Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Materiał nie powinien być stosowany po upływie daty ważności.

Rodzaje opakowań:

Pojedyncze opakowania

Zestawy

Nasze doradztwo techniczne w formie ustnej, pisemnej lub na drodze eksperymentów jest rezultatem naszej najlepszej wiedzy, należy je jednak traktować wyłącznie jako niezobowiązującą wskazówkę również w odniesieniu do ewentualnych praw osób trzecich i nie zwalniają one Państwa z obowiązku przeprowadzenia własnych testów dostarczonych przez nas produktów pod kątem możliwości zastosowania do Państwa własnych celów. Zastosowanie i przetwarzanie produktów odbywa się poza naszą kontrolą i dlatego należy wyłącznie do Państwa zakresu odpowiedzialności. Naturalnie gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.