

MELIODENT® Rapid Repair

PL Instrukcja stosowania

CE 0044

Kolor

Oznaczony na opakowaniu

Skład

Tworzywo polimeryzowane na zimno, proszek (polimetakrylan metylu) i płyn (metakrylan metylu, dwumetakrylan)

Zastosowanie

Żywica akrylanowa do

- Uzupełniania protez złożonych
- Odtwarzania funkcji protez, np. napraw lub podścielania

Do stałych i ruchomych protez dentystycznych.

Instrukcja stosowania

Do wykonywania modeli zaleca się stosowanie twardego gipsu. Tworzywo akrylowe na płyty protez Meliodent Rapid Repair można dozować z wolnej ręki. Zalecane proporcje mieszania to 10 g proszku do 7 ml płynu. Płyn wlać do naczynia, dodać proszek w wymaganej ilości i mieszać intensywnie przez ok. 30 sekund. Mieszanka o konsystencji płynnego (kapiącego kroplami) ciasta może być od razu poddana dalszej obróbce. Czas pracy w temperaturze pokojowej (23°C) wynosi ok. 2 minuty, czas wiązania ok. 10 – 14 minut.

Optymalna polimeryzacja zachodzi w urządzeniu Palamat przy 55°C, 2 barach, w czasie 10 minut. W przypadku pracy bez urządzenia do polimeryzacji ciśnieniowej, grubsze miejsca modelować warstwowo i każdą warstwę przed nałożeniem kolejnej całkowicie spolimeryzować.

Uwaga

Do momentu umiejscowienia protezy w ustach, należy przechowywać ją w wodzie.

Uwagi dotyczące przechowywania

Nie używać materiału po upływie daty ważności. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Unikać bezpośredniego kontaktu ze słońcem. Opakowania po użyciu zawsze szczelnie zamykać i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Uwagi – ostrzeżenia dotyczące płynu

Łatwopalny! Drażniący dla oczu, narządów układu oddechowego i skóry. W kontakcie ze skórą może powodować reakcję alergiczną. Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w przewiewnych miejscach. Unikać kontaktu z oczami. Przechowywać z dala od źródeł ognia

- nie palić tytoniu. Nie wlewać do kanalizacji. Zakładać odpowiednie rękawice ochronne.

Opakowania dostępne w sprzedaży

proszek: 100 g, 1000 g., 50kg.

płyn: 80 ml, 500 ml, 30l., 180l.

Nasze porady techniczne w zakresie zastosowania, czy to w mowie, piśmie czy w drodze prób oparte są na naszej najlepszej wiedzy i dobrej wierze, działają jednak jako niewiążące wskazówki bez żadnej gwarancji, także w odniesieniu do ochrony praw osób trzecich i nie zwalniają użytkownika od obowiązku własnej oceny czy dostarczane przez nas produkty nadają się do zamierzonych celów i procedur. Zastosowanie, użycie i opracowywanie produktów następuje poza naszymi możliwościami kontroli i leży dlatego wyłącznie w obszarze odpowiedzialności użytkownika. Gwarantujemy oczywiście wolną od jakichkolwiek zastrzeżeń jakość naszych produktów według naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dystrybucji.

Biuro:

ul. I Dywizji Pancерnej 45

43-300 Bielsko-Biała

+48 (33) 496 35 39

info-poland@heraeus.com

Country Manager:

Jarosław Bruszewski

+48 600 047 209

jaroslaw.bruszewski@heraeus.com